

子宮内避妊用具

FD-1

FD-1を装着する前に、この手帳を必ずお読みください。

装着中はお手元に保管し、定期的に確認するようにしてください。
ご質問がある場合は、主治医にご相談ください。




不二ラテックス株式会社

FD-1とは

① FD-1について

FD-1は、経産婦を対象にした子宮内避妊用具(IUD)の一種で、子宮内に装着する事によって、避妊効果を得る医療用具です。子宮内に装着するデバイス部分は下図のようになっており、挿入される方の子宮長に合わせて、P-70(子宮長70mm未満の方)、P-80(子宮長70~80mmの方)のどちらかを選んでいただきます。

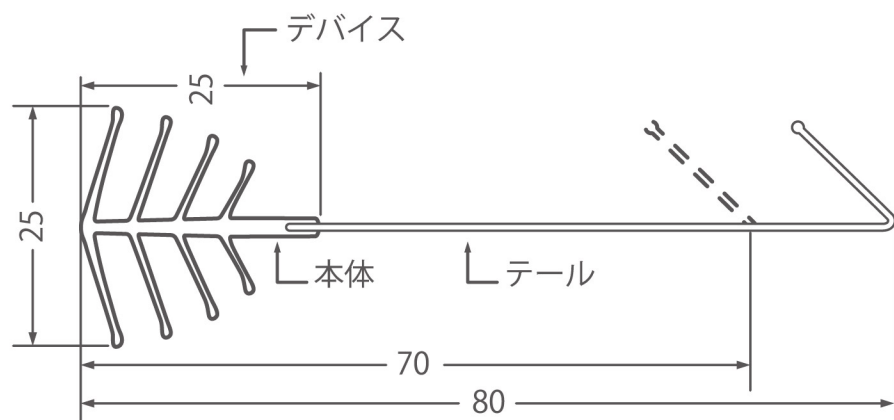

② FD-1の装着方法


FD-1の装着は、医師が行い、右図のように装着されます。

③ 避妊になる仕組み

FD-1は装着する事によって、避妊効果が得られます。妊娠の仕組みは、子宮内に入ってきた精子が、卵管で卵子と結合し、受精卵となって子宮内に着床する事によって起こります。FD-1は、受精卵が着床する事を防いで、避妊効果を得ます。

④ 装着できる時期、期間

FD-1の装着は、**月経開始後10日以内**で、妊娠している恐れのない時期を選んで行います。産後は、6週間以上経過してから装着してください。FD-1の使用期間は、通常2年程度、長くても5年までです。定期検診を受け、主治医の判断の元、交換等を行ってください。

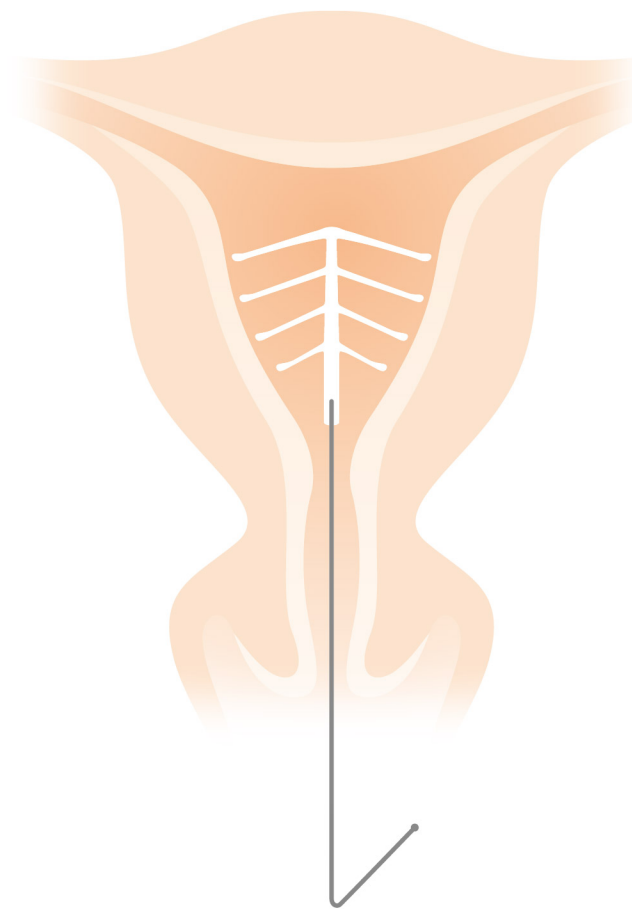

FD-1とは

⑤ FD-1のメリット

FD-1は正しい位置で装着されている限り、避妊効果を発揮します。コンドームのように男性の協力が必要だったり、経口避妊薬のように、定期的に薬を服用する必要もありません。

FD-1は、金属、薬剤を使用していない為、MRI・CT検査の受診も可能です。また、他の医薬品、授乳等に影響を与えません。

⑥ FD-1の避妊率

FD-1の避妊率は100%ではありません。

FD-1の場合、100人の婦人に1年間装着した場合、3～5人が妊娠すると言われています（避妊率96%）。コンドームの場合、避妊率は85～98%と言われています。

*日本産婦人科医会の調査データによる



注意事項

① 装着する前に注意すべき事

FD-1を装着する前には、主治医にご自身の健康状態を正しく伝え、よく相談してください。また、装着する場合、下記の事に留意してください。

- (1) FD-1はHIV感染症(エイズ)やその他の性感染症を防止するものではありません
- (2) FD-1の避妊率は100%ではありません
- (3) FD-1は経産婦を対象としています
- (4) 避妊目的のため、保険の適用外です

② 装着できない方

下記に当てはまる場合、FD-1を装着しないでください。

- (1) FD-1を構成する材料に対して過敏症の既往歴がある方
- (2) 妊娠中、または妊娠の疑いがある方
- (3) 異常に長い月経、その他の機能性出血、血液凝固に障害のある方
- (4) 子宮内に悪性腫瘍、変形を来すような筋腫のある方
- (5) 子宮変形、解剖学的位置の異常等、子宮の異常がある方

注意事項

- (6) 骨盤内炎症性疾患 (PID)、子宮内壁、頸部、卵管等に炎症のある方
- (7) 過去3ヶ月以内に感染性流産を経験した方
- (8) 子宮外妊娠の既往歴、または子宮外妊娠の素因がある方
- (9) 子宮内避妊用具 (IUD) 装着時、頸管拡張時に異常を感じた方
- (10) 性感染症にかかっている方
- (11) 産婦人科領域外であっても、重篤な疾患の方

③ 装着中の注意事項

FD-1は、月経の際に、自然に脱落する事があります。特に、装着後3ヶ月以内に起こりやすいため、定期検診を必ず受診してください。装着後、数日間は少量の出血、不快感、軽い下腹痛を感じる場合がありますが、徐々に収まります。

下記の場合、必ず主治医にご相談ください

下腹痛、多量出血、月経がない場合、その他、異常と思われる症状があった場合

定期検診

使用開始日

年

月

日

医療機関名:

カルテNo:

氏名:

定期検診予定日:

第1回 (初回月経後)

年

月

日

第2回 (装着3ヶ月後)

年

月

日

第3回 (装着6ヶ月後)

年

月

日

第4回 (装着1年後)

年

月

日

第5回 (装着1年6ヶ月後)

年

月

日

第6回 (装着2年後)

年

月

日

不二ラテックス
メディカルホームページのご案内



<https://www.fujilatex.co.jp/medical/>

製造販売業者

不二ラテックス株式会社

〒328-0006 栃木県栃木市国府町150

製品問い合わせ

不二ラテックス株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-19-1

TEL 03-3259-2528 FAX 03-3293-2426